



SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

**Su socio en la sala de partos
Partura® – La cama de partos**



A Sense of Company

Sus más de 90 años de experiencia convierten a SCHMITZ en uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de productos técnicos sanitarios.

La tradición se vive en esta empresa familiar. La media de antigüedad en la empresa es de 18 años, lo que demuestra que nuestros empleados se sienten muy identificados con nuestros valores y filosofía.


Friedrich y Matthias Schmitz dirigen la empresa desde 2012 como cuarta generación.

Somos partidarios de mantener nuestra sede en Alemania y estamos profundamente arraigados a nuestra región de origen. Desarrollamos y producimos aquí.

Trabajamos con proveedores que proceden en un 90 % de Alemania y en un 60 % de la región.

Made in Germany



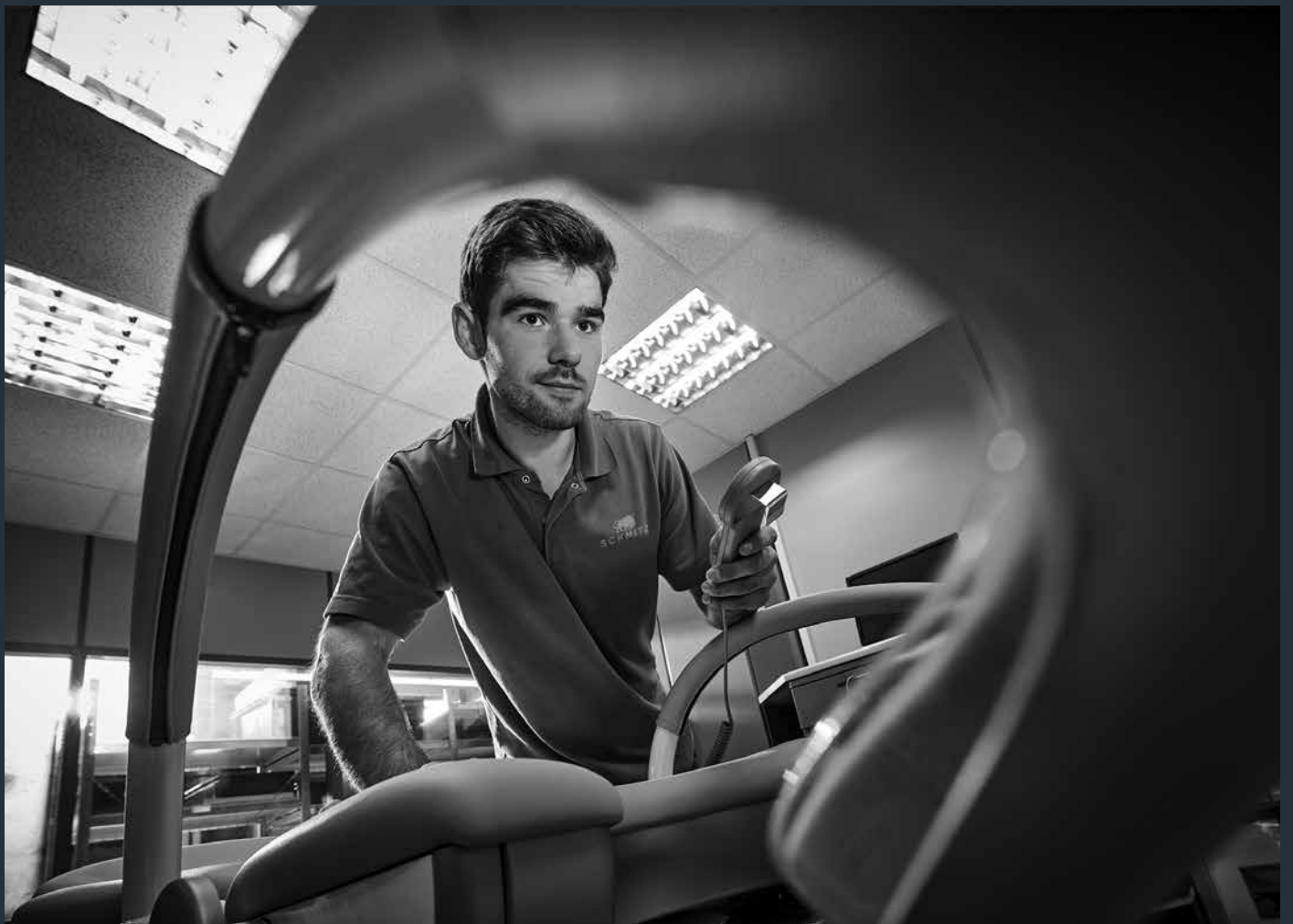

A Sense of Care

Entendemos y vivimos los servicios esperando conseguir la satisfacción plena de nuestros clientes. Desde el asesoramiento y la planificación hasta el montaje.


Durabilidad que genera rentabilidad, eso es lo que puede esperar de nosotros.

Con un concepto de servicio bien concebido y una atención completa, sobre todo después de la compra. SCHMITZ está a su lado desde el principio.

Servicio técnico de atención al cliente

tel. +49 (0)2377 84 549

service@schmitz-medical.com

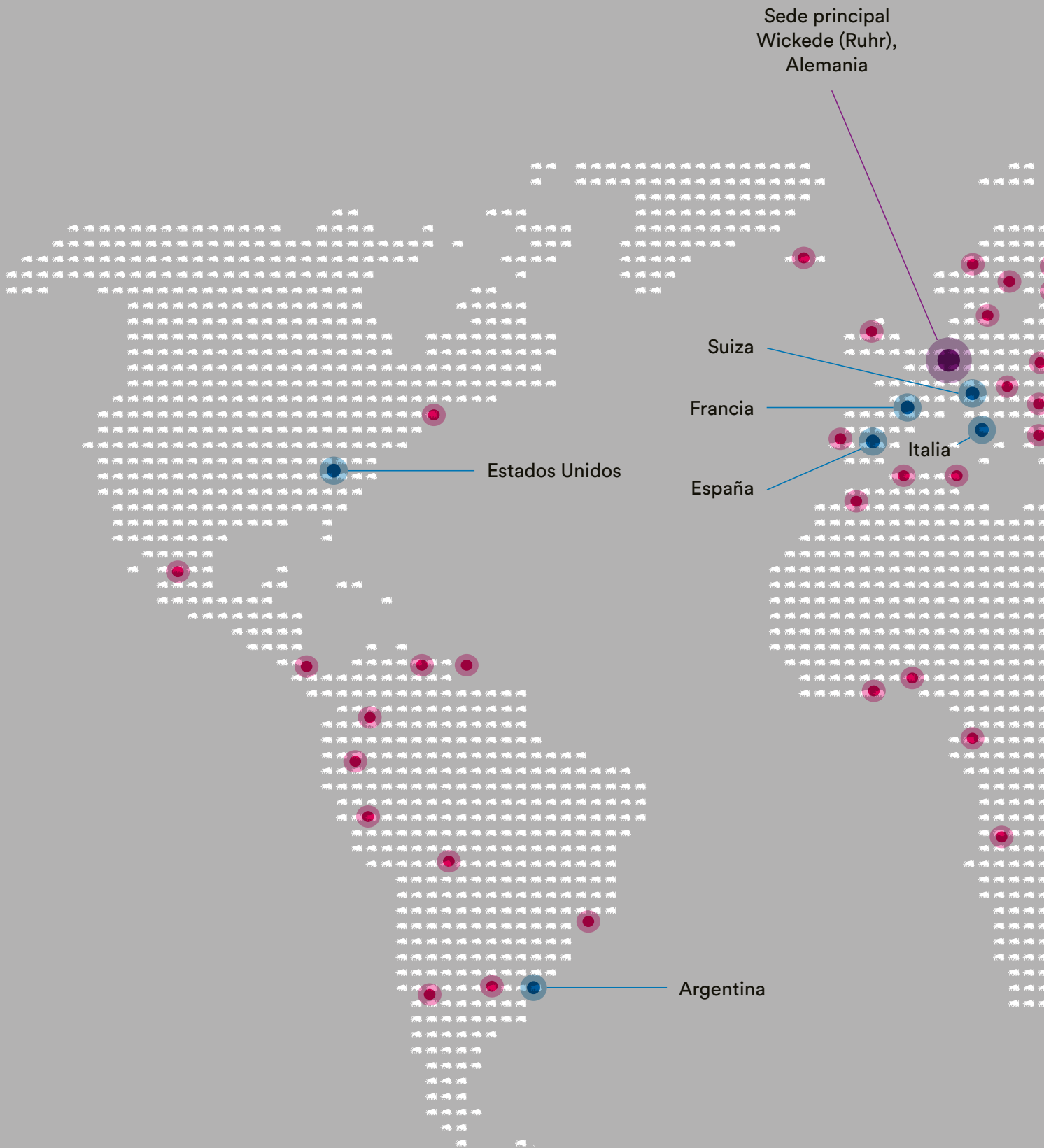

Sede principal
Wickede (Ruhr),
Alemania

Suiza

Francia

Italia

España

Estados Unidos

Argentina

- más que 80 asociados internacionales
- filiales

SCHMITZ – representada en todo el mundo





Concepto: Karin Berghammer/Iris Podgorschek
Concepto: podpod design

Partura® CEMD **cómoda, versátil y segura**

La mayor libertad de movimientos posible para la futura madre durante la fase de dilatación y expulsión y ajuste individual de la cama en todo momento con un mando manual. Esa es la máxima detrás del concepto de cama de partos.

La superficie de descanso, que está acolchada de manera agradable, ha sido diseñada de modo espacioso para permitir que el futuro padre brinde a su esposa la compañía y el apoyo necesarios durante el trabajo de parto. La parte de la cama correspondiente a los pies puede separarse del resto de la cama y utilizarse separadamente, por ejemplo, como asiento para la comadrona.

La cama de partos SCHMITZ satisface todas las exigencias.

Combina un diseño estético con una gran comodidad para la futura madre, a la vez que proporciona condiciones de trabajo ideales para el equipo encargado de la atención obstétrica.

Además, los revestimientos cerrados y lisos de la cama y las superficies del acolchado se pueden limpiar y desinfectar fácilmente.

Y - en caso de ser necesario - con sólo un par de maniobras es posible cambiar la forma de la cama para posibilitar al médico la realización rápida de las maniobras obstétricas indicadas.

Partura® – La cama de partos para un parto seguro y apacible.





Partura® cómoda, versátil y segura

Versatilidad

Partura® se caracteriza por permitir diferentes posturas de parto y una gran libertad de movimientos.

Elección de colores personalizados

Con nuestra gran selección de colores, la cama Partura® se adapta perfectamente a cualquier sala y crea un ambiente agradable.

Si lo desea, puede probar todas las combinaciones posibles. Utilice el configurador de colores en nuestro sitio web, vea el código QR al final de esta página.

Vivir juntos la «vida»

El acompañamiento de la pareja durante el parto. Una experiencia maravillosa para la futura familia. Gracias a la amplia superficie de reposo y a la parte separable para los pies, la pareja puede participar en el proceso si así lo desea.

Descubra nuestro nuevo
configurador de
productos y colores:



Partura® Posiciones



Estado de apertura

cama en su posición inferior (64 cm) para alternar entre relajación y movimiento. La baja posición de la cama facilita entradas y salidas.



Parto en posición de litotomía

posición clásica.



Parto con elevación de pelvis, distoquia de hombros,

intervención quirúrgica o manual.



Primer estado y/o estado de transición, en posición rodillas-codos

en caso de contracciones a pesar de remanentes cervicales y en caso de asfixia intrauterina.




Parto en posición rodillas-codos

en caso de multiparas preepidurales, para alivio del perineo y en caso de fetos excepcionalmente grandes.




Postparto, después del parto en posición rodilla-codo

la parturienta no necesita rotar después del parto, simplemente se puede recostar.

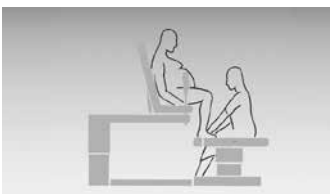

Segundo estado en posición vertical, con respaldo elevado

cómoda posición sentada; los escotes de la colchoneta evitan presión sobre el perineo. La parturienta no necesita compañero, posible intervención manual en caso de posición final de pelvis.

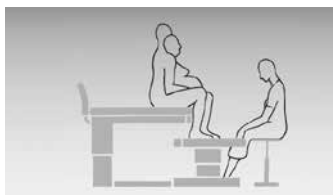

Segundo estado en posición vertical con compañero

la parturienta se puede recostar en el compañero, contacto físico.



Parto en cuclillas

eje de parto óptimo, cifosis máxima, perineo aliviado.




Parto en cuclillas con compañero

el hombre puede levantar a la mujer al paso del cráneo, contacto físico.



Parto quirúrgico

extracción por fórceps o vacío, intervención manual en caso de posición final de pelvis, postparto para tratamiento del perineo y extracción manual de placenta.

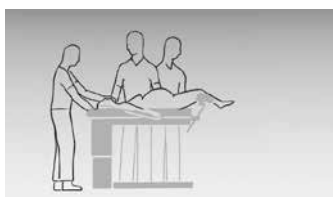


Cesárea en sala de parto

en caso de indicación absoluta.



Posición de shock

en caso de prolapso del cordón o colapso circulatorio.

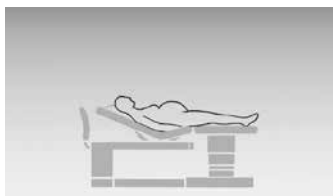

Elevación de piernas

para relajación.

Partura® y accesorios

Referencia	Descripción
------------	-------------



140.1010.0	Cama de partos Partura®
-------------------	--------------------------------

	Parte principal con asiento y respaldo, parte para los pies. Movilidad mediante ruedas pivotantes con freno central activado con pedal. La parte principal y la parte para los pies se pueden separar; la parte para los pies se puede colocar debajo de la base y encaja en cuatro posiciones. Incluye dos mandos manuales con conexión de cable.
--	--

	Encontrará el equipo de serie de la cama de partos Partura® en la página 19.
--	--



104.6010.0	Cojín para el apoyo de la espalda
-------------------	---

104.6020.0	Sábanas
(sin il.)	de dos piezas, blancas, lavables en caliente hasta 95 °C

Referencia Descripción



104.6030.0 Agarradera de soporte
para estabilizar el cinturón escapular, tubo de acero, recubrimiento de polvo de resina, inclinable y ajustable en altura, con dos clamps de fijación giratorios de acero al cromo-níquel, fijación en los rieles laterales



104.6040.0 Soportes laterales (par)
desmontables, de acero con recubrimiento de polvo de resina, piezas de fijación de acero al cromo-níquel 18/10, para montar en ambos lados del respaldo



104.6050.0 Batea
de acero al cromo-níquel,
medidas 355 x 325 x 100 mm (l x a x p)



104.6060.0 Perneras (par)
piezas de fijación de acero al cromo-níquel 18/10,
placas de pies de plástico gris



Partura®

completamente equipada para dar a luz cómodamente

Para facilitar el acceso de la comadrona y el médico, la parte principal se puede separar de la parte para los pies y utilizarse como asiento o superficie de apoyo.

- Ajuste paralelo y separado de la parte principal de la cama como de los pies.
- De fácil limpieza y desinfección por sus superficies planas y sin fisuras, el acolchado es desmontable.
- Ruedas dirigidas con fijación central para traslado de la cama.
- Amplia selección de colores de hasta 22 tonos diferentes.
- Múltiples posibilidades de ajuste, muy estable y con un amplio espacio para las diferentes posiciones del parto, también aquellas en las que participe la pareja.
- Función de ajuste eléctrica mediante dos mandos manuales de fácil acceso.
- Aceleración suave de los movimientos de la cama.
- Respaldo multifuncional, intercambiable entre la cabecera y la parte de los pies.
- Perneras con rotula para pasar rápidamente de la posición inicial a la de shock si es neces
- Sistema de seguridad en caso de fallo eléctrico a través de las baterías integradas.



Las perneras pueden voltearse y ocultarse rápida y fácilmente debajo de la superficie de la cama y sacarse en la posición utilizable.



El respaldo puede instalarse también a los pies de la cama.



Espacio para almacenar los asideros que no se estén usando durante el parto.



Interruptor principal, conector de equiparación de potencial, indicador del estado de carga de las baterías, enchufe CEI 60320 C13.



La barra para infusiones puede instalarse a ambos lados del cabezal.



Palanca para frenar la parte de los pies.



Asideros para el desplazamiento fácil de la parte de los pies.



Dos controles manuales con conexión por cable espiral, en ambos lados de la parte principal.

Partura® C€MD

Equipamiento básico

Parte principal con asiento y respaldo, y parte para los pies, ambas móviles mediante ruedas giratorias y freno central. La parte principal y la parte correspondiente a los pies de la cama pueden separarse. Esta última puede alojarse por debajo de la parte principal, en cuatro posiciones de encaje. Parte del asiento con corte de 150 mm de radio.

Colchón de dos componentes, para la parte principal y para los pies de la cama, hecho de espuma plástica estratificada de alta elasticidad, impermeable a la humedad y asegurado contra el deslizamiento.

Juego de sábanas de dos partes, blanco, lavable en caliente a temperaturas hasta 95 °C.

Recubrimientos y bastidor de acero con capa de polvo de resina. Colores a elegir según tarjeta SCHMITZ. Respaldo encastrable tanto en la cabecera como a los pies de la cama, con cojín de plástico imitación cuero (gris piedra 96). Dos perneras tipo Goepel, de acero al cromo-níquel 18/10, con acolchado de espuma integral en color gris argentado, altura regulable. Dos piezas articulares giratorias para añadir las perneras de ajuste rápido.

Dos asideros de acero al cromo-níquel 18/10 y espuma integral en color gris argentado, encastrables a los lados de la cama. Barra para infusiones con 4 ganchos, de acero al cromo-níquel 18/10, que puede fijarse a la cabecera de la cama y lateralmente, en la sujeción de los asideros. Vástago de altura regulable.

Apoyo para la espalda a nivel del recorte del asiento, semicircular, espuma integral en color gris argentado, para el parto en cuclillas. Dos controles manuales con conexión por cable, a los lados izquierdo y derecho de la parte principal de la cama, que permiten efectuar los cambios de posición necesarios.






Regulaciones por electromotor:

- Regulación de la altura de la parte principal
- Cambio de posición del respaldo
- Cambio de posición del asiento
- Inclinación de la superficie de la parte principal (posición de shock)
- Regulación de la altura de la parte (se junta con la parte principal)

Sistema de seguridad en caso de fallo eléctrico a través de las baterías integradas.

Colores

- Colchón de 2 piezas para la parte principal/parte para los pies: gris piedra 96
- Colchón del respaldo: gris piedra 96
- Perneras, asideros y apoyo para la espalda: goma espuma integral en gris argentado
- Revestimiento de acero: recubrimiento de polvo de resina en color según tarjeta SCHMITZ.

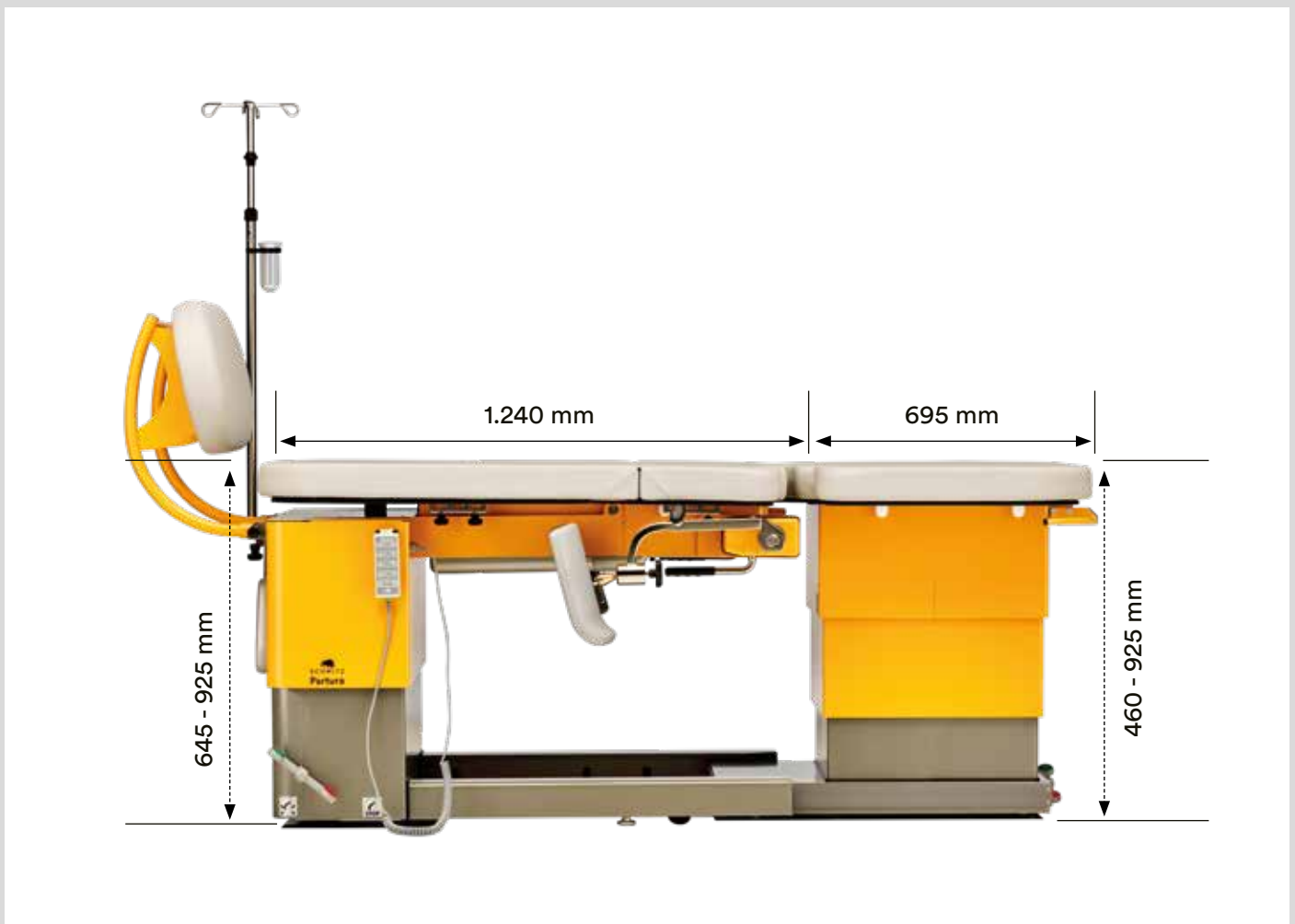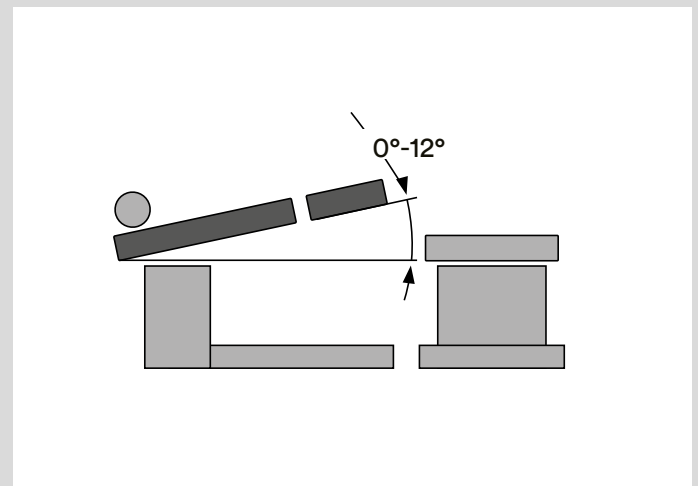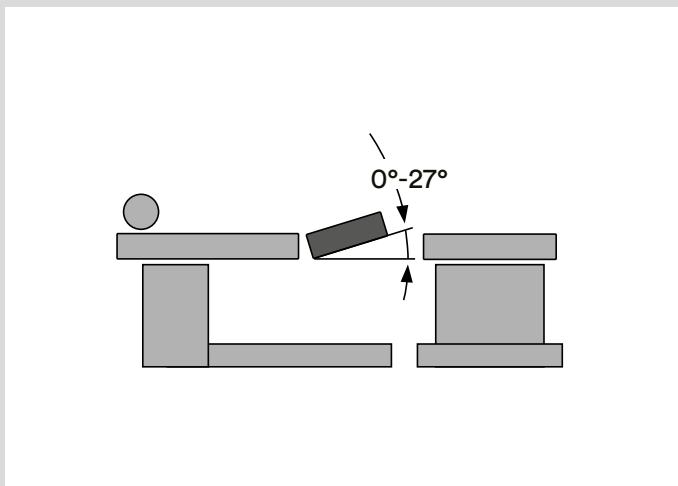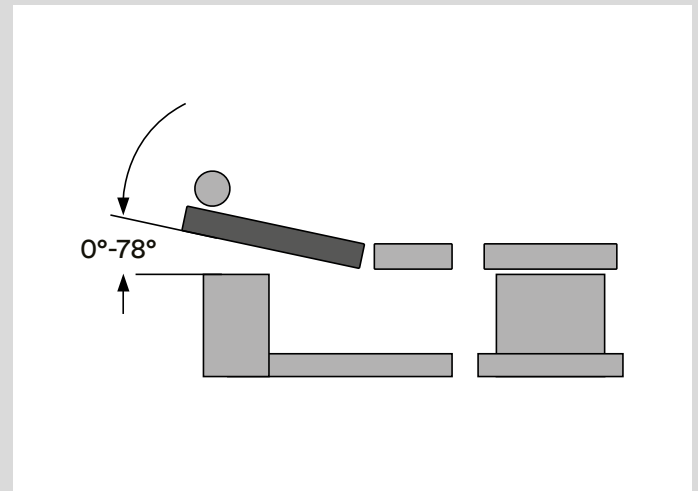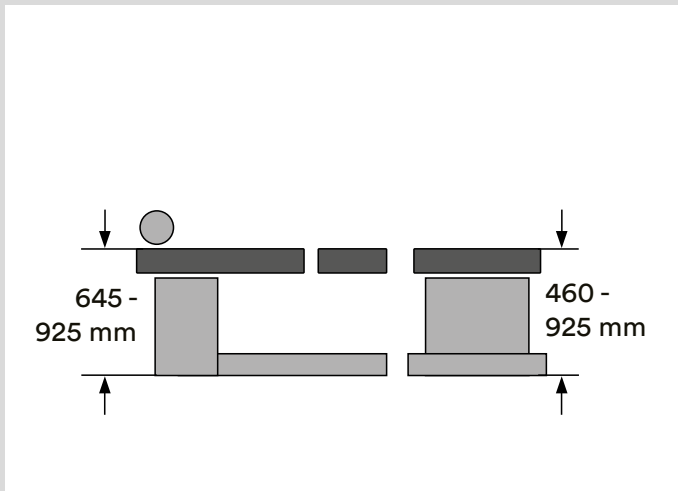

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Partura®

Rango de ajustes, medidas


Medidas

Regulación de la altura de la parte principal	de 645 a 925 mm
Regulación de la altura de la parte de los pies (solamente posible si junta con la parte principal)	de 460 a 925 mm
Dimensiones externas de la cama de partos con respaldo insertado	2330 mm de largo x 1015 mm de ancho
Superficie de descanso	1950 mm de largo x 950 mm de ancho
Longitud del colchón de espalda	890 mm
Longitud del colchón del asiento	350 mm
Longitud del colchón de los pies de la cama	695 mm
Espesor del colchón	80 mm
Angulo de inclinación de la superficie de descanso	0 a 12 grados (posición de shock)
Angulo de inclinación del espaldar	0 a 78 grados
Angulo de inclinación del asiento	0 a 27 grados
Carga de trabajo segura (parte principal)	220 kg
Carga de trabajo segura (parte de los pies)	135 kg
Peso parte de los pies	110 kg
Peso parte principal	265 kg
Peso total	375 kg
Tensión eléctrica	230 voltios (corriente alterna)
Frecuencia	50 Hz
Potencia	máx. 0,76 KW
Clase de protección	I







Barnizados

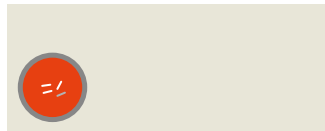

blanco grisáceo
RAL 9002

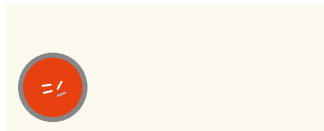

blanco puro
RAL 9010

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

lirio de agua blanco
RAL 0758510



naranja azafrán claro
RAL 0608530



amarillo señales
RAL 1003



naranja sanguíneo
RAL 2002



rosa loto
RAL 3608510



tricot lila blanco
RAL 3108510



azul tenis
RAL 2307020



azul claro
RAL 2606030



azul zafiro
RAL 5003



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
azul pálido
RAL 2308010



verde lima
RAL 1008060



verde filigrana
RAL 1207020



verde helado
RAL 1209030



aluminio blanco
RAL 9006



aluminio gris
RAL 9007



gris antracita
RAL 7016



antimicrobiano
Estos colores tienen propiedades antimicrobianas

Colores para acolchados y barnizados




Descubra nuevas gamas de colores

Con un total de 19 colores de acolchado y otros 18 tonos de acabado, dispone de muchas posibilidades para dar un toque de color a su sala.

Ya se trate de un tono apagado o alegre, clásico o moderno, elegante o extravagante, le garantizamos que en nuestro surtido encontrará rápidamente lo que busca.

Estamos a su disposición para cualquier consulta.

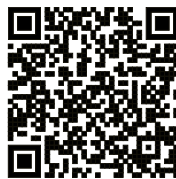

Déjese inspirar:
www.schmitz-medical.com


Recomendamos:

Accesorios para la limpieza de acolchados



Referencia	Descripción
2019878 (sin il.)	Detergente para piel artificial Bote pulverizador de 500 ml, en paquete de 3 unidades
2026973	Kit de limpieza para piel artificial 1 bote pulverizador de 500 ml y 1 cepillo

Para las informaciones detalladas sobre la limpieza y la desinfección de cueros artificiales ver nuestras instrucciones de uso.

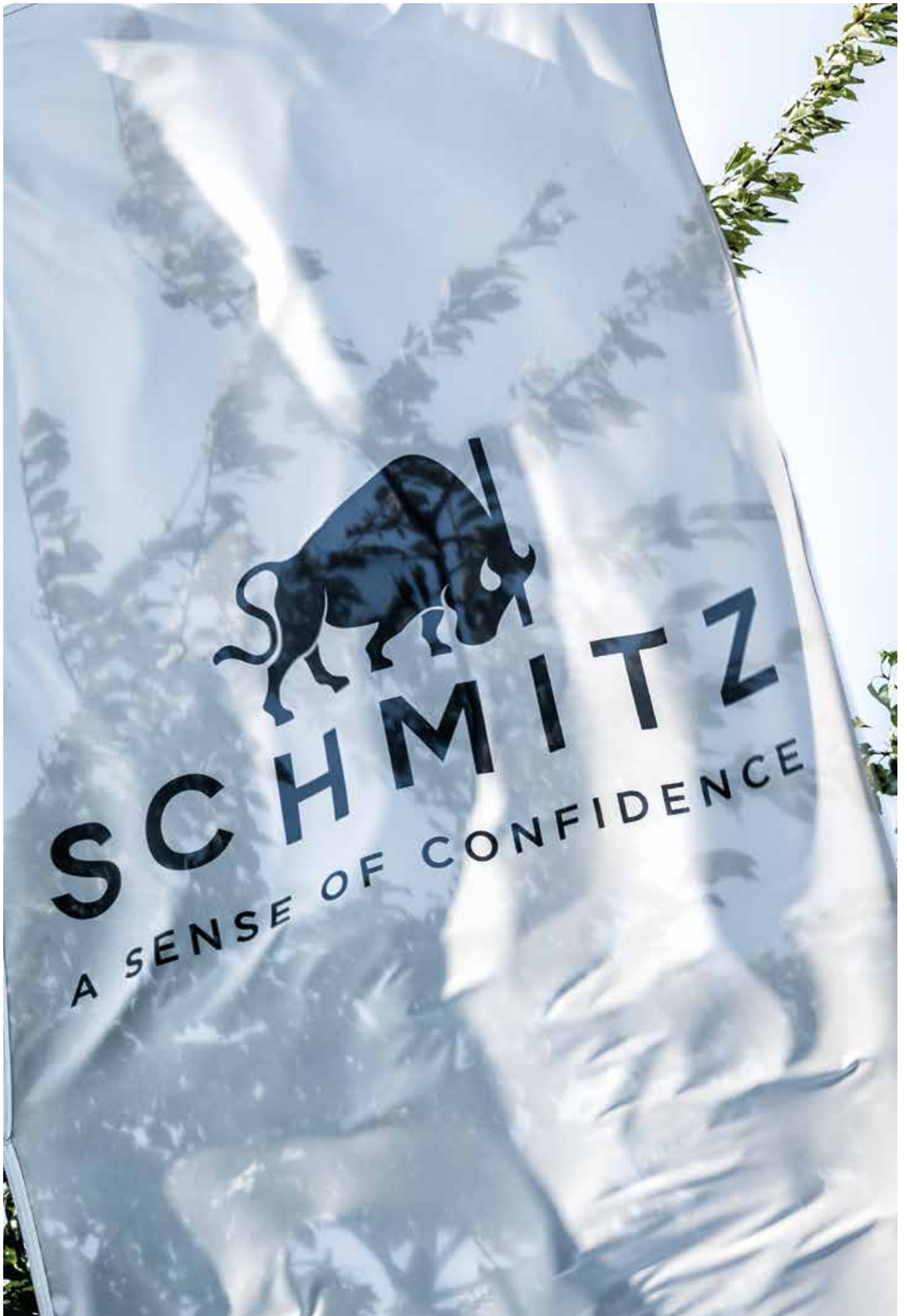

Contacto

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostefeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Alemania

tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-medical.com

Departamento de Exportación:
tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-medical.com

Servicio técnico, línea directa:
tel. +49 (0)2377 84 549
fax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-medical.com

En nuestras páginas de internet
podrá encontrar información
sobre nuestras sucursales en
todo el mundo.

www.schmitz-medical.com



Todos los productos con la etiqueta CE-MD que se combinen con nuestros accesorios cumplen los requisitos del Reglamento sobre productos sanitarios 2017/745/UE, así como la Ley de enmienda de productos sanitarios, y son productos sanitarios de la clase de riesgo I.



Todos los productos con la etiqueta CE cumplen los requisitos de la Directiva de baja tensión 2014/35/UE, así como la Directiva sobre material eléctrico.

En el manual de instrucciones encontrará una explicación detallada del uso previsto.



* Este artículo es mercancía de comercio, que se vende con el nombre de OEM.

Nuestras prestaciones se entienden ex fábrica. Todas entregas se realizarán mediante nuestros socios autorizados o nuestras sucursales. Salvo modificaciones constructivas y dimensionales, se admiten pequeñas diferencias técnicas. Respecto a los colores de la tabla, puede haber variaciones por razones técnicas. Los artículos mencionados en este catálogo no están autorizados para su venta en los Estados Unidos. Contribución simbólica 3,00 Euro.